




RHEOLYSE®

INVISIBLE PURE

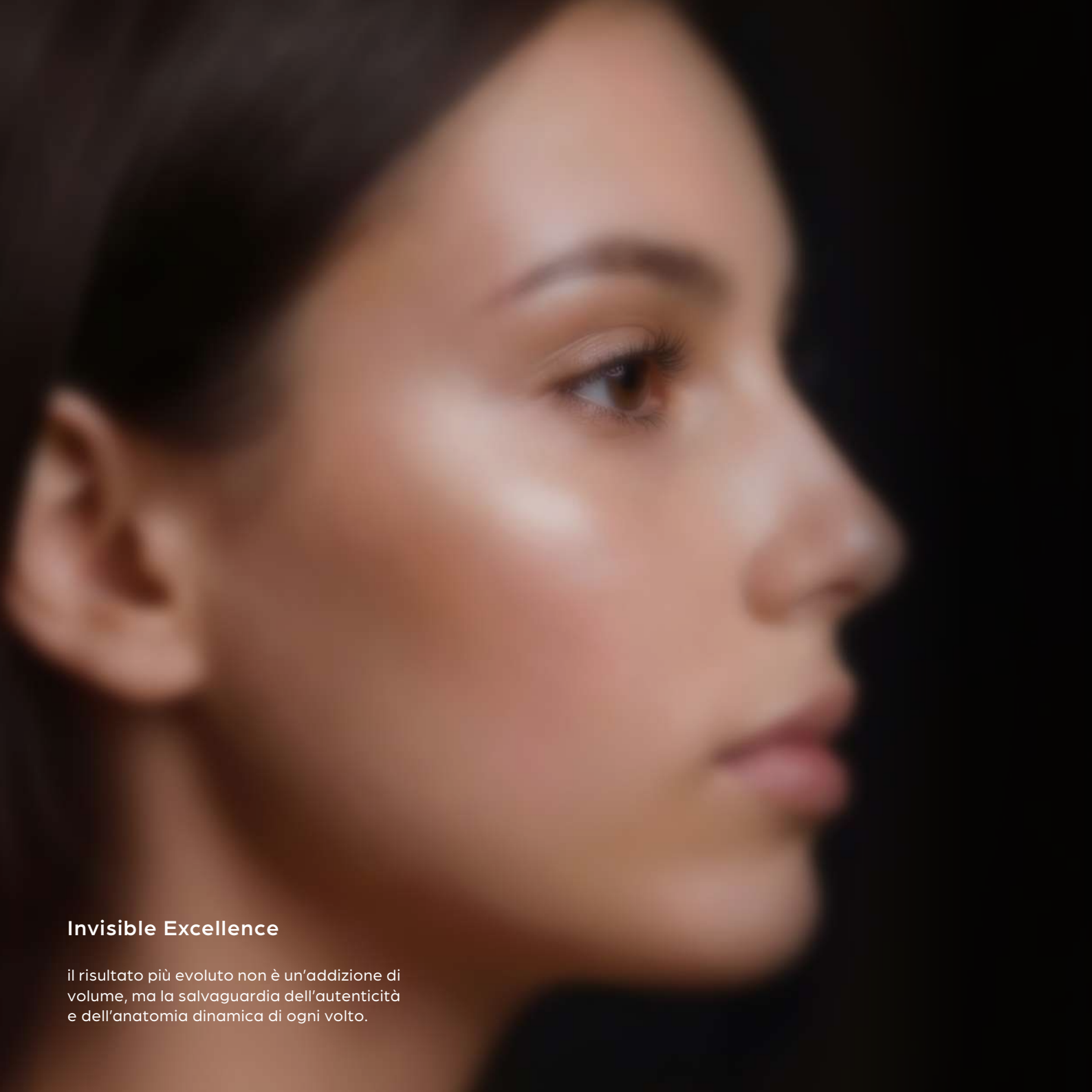

## Invisible Excellence

il risultato più evoluto non è un'addizione di volume, ma la salvaguardia dell'autenticità e dell'anatomia dinamica di ogni volto.



## La Scienza della Naturalizza

L'eccellenza, in un'estetica orientata alla naturalizza, si esprime nell'impercettibilità del gesto: il risultato più evoluto non è un'addizione di volume, ma la salvaguardia dell'autenticità e dell'anatomia dinamica di ogni volto.

Da questa visione nasce Aesthemed, brand italiano specializzato nello sviluppo di filler a base di acido ialuronico. Ogni formulazione è progettata per ottenere risultati naturali attraverso un approccio scientifico fondato sulla reologia: non è la quantità di prodotto a determinare l'esito clinico, ma il suo comportamento nei tessuti.

La ricerca di Aesthemed prende forma in Rheolyse, linea sviluppata per tradurre la scienza reologica in performance clinica prevedibile. Un sistema formulativo progettato per accompagnare i diversi comparti anatomici con coerenza e continuità, rispettando struttura, dinamismo ed espressività.

Rheolyse si articola in due linee complementari, pensate per rispondere a esigenze cliniche differenti ma unite dallo stesso principio progettuale: scegliere il comportamento del prodotto prima ancora del volume, per preservare equilibrio, armonia e naturalizza.

# Rheolyse

L'obiettivo di Rheolyse è intervenire con precisione, guidando l'equilibrio anatomico attraverso un approccio scientifico orientato alla naturalezza. Ogni formulazione è sviluppata partendo dai parametri reologici -  $G'$ ,  $G''$ ,  $\tan \delta$  - per offrire una risposta coerente con il piano trattato, nel rispetto di struttura e dinamica tissutale.

Per Rheolyse, l'eccellenza coincide con la coerenza tra progettazione reologica, risultato clinico e identità del volto.

## RHEOLYSE®

### Invisible Linked

Quattro formulazioni (Hydratine, Sublimelip, Dynamic e Deeplift) studiate per un'integrazione armonica nei diversi piani anatomici, con un profilo reologico orientato alla naturalezza e al controllo dinamico.

Progettati per accompagnare movimento ed espressività, questi prodotti favoriscono continuità tissutale e proporzione, mantenendo coerenza tra struttura e funzione.

## RHEOLYSE®

### Invisible Pure

Due formulazioni (Puresense 64 e Restore 32) a base di acido ialuronico puro, sviluppate per garantire risposta strutturale e precisione nei trattamenti che richiedono maggiore sostegno.

L'elevata purezza e la definizione del comportamento meccanico consentono un controllo accurato del risultato nei piani anatomici a più alta richiesta funzionale, nel rispetto della morfologia del volto.

# Parametri

La linea Invisible Pure di Rheolyse utilizza acido ialuronico puro, lineare e non cross-linkato, come base formulativa secondo un razionale orientato alla fisiologia tissutale. Il trattamento si inserisce in un protocollo clinico progressivo, in cui il rispetto dei tempi biologici rappresenta un fattore terapeutico determinante.



Acido ialuronico puro



Diffusione nel tessuto



Integrazione omogenea

## Acido ialuronico puro

La linea Invisible Pure di Rheolyse è formulata con acido ialuronico puro, lineare e non cross-linkato, ottenuto da fermentazione batterica, per un approccio fisiologico al trattamento di viso e corpo.

Questa scelta formulativa consente:

- diffusione omogenea nei tessuti
- elevata integrazione tissutale
- stimolazione progressiva, senza rigidità né alterazioni della morfologia

La concentrazione orienta il comportamento clinico del prodotto, in relazione al piano anatomico e all'obiettivo terapeutico.

## Protocollo di trattamento

I prodotti Rheolyse si inseriscono in un percorso clinico strutturato, in cui il tempo rappresenta un fattore terapeutico essenziale.

L'acido ialuronico puro agisce secondo i ritmi biologici del tessuto. Per questo motivo, l'efficacia clinica richiede:

- rispetto delle tempistiche tra una seduta e l'altra
- continuità del trattamento
- programmazione coerente del protocollo

Ogni seduta contribuisce a costruire una risposta progressiva e stabile.

La variazione non programmata degli intervalli riduce la qualità della risposta biologica.

AESTHAMED



Inquadra il  
QR e scopri  
l'anatomia  
applicata



AREA FRONTALE



AREA PERIOCLARE



AREA GUANCE



AREA PERIORALE





## Restore 32

Dispositivo medico riassorbibile indicato per l'idratazione della cute e per la correzione degli inestetismi cutanei superficiali di viso e corpo. Agisce a livello dermico favorendo il recupero della funzione cutanea e supportando i processi di riparazione del tessuto dermico, con miglioramento progressivo della qualità della pelle. Formulato come gel sterile, apirogeno e fisiologico, a base di acido ialuronico sale sodico di origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica.

**Idratazione dermica**  
**Riparazione cutanea**  
**Qualità tissutale**



Area  
frontale



Area  
perioculare



Area  
guance



Area  
periorale

\_1

### **Acido ialuronico**

32 mg/2 g da 2 ml

### **Composizione**

Acido ialuronico sale sodico 32 mg/2 g

Tampone fosfato, cloruro di sodio, acqua  
per soluzioni iniettabili q.b. 2 g

### **Packaging 1x2 ml**

1 aghi – 30 G x 4 mm

Talloncini adesivi

### **Piani anatomici**

Fronte

Area Perioculare

Guance

\_2

Collo e décolleté

Area Periorale

### **Protocollo di mantenimento**

2<sup>a</sup> seduta: a 15 giorni dalla 1<sup>a</sup> seduta

3<sup>a</sup> seduta: a 45 giorni dalla 2<sup>a</sup> seduta

### **Microponfi**

Iniezioni intradermiche puntiformi a  
distanza regolare di circa 1 cm

### **Parametri reologici**

G': 10 Pa


G<sup>o</sup>: 30 Pa

δ: 3,0

AESTHEMED



Inquadra il  
QR e scopri  
l'anatomia  
applicata

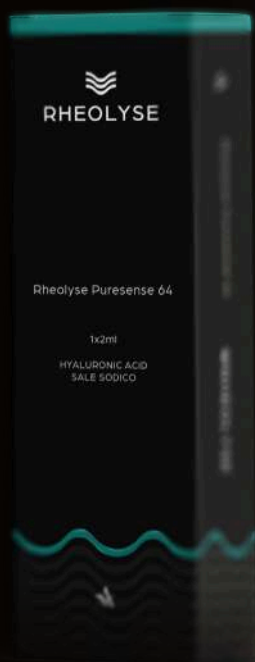

AREA TEMPORALE



AREA CUSCINETTO ADIPOSO



ANGOLO MANDIBOLARE



AREA MARIONETTA



## Puresense 64

Dispositivo medico riassorbibile indicato per il ripristino del supporto dei tessuti profondi e per il miglioramento della qualità cutanea nei distretti con perdita di volume. Agisce a livello ipodermico favorendo una proiezione naturale e stimolando progressivamente idratazione, viscoelasticità e attività metabolica del tessuto. Formulato come gel sterile, apirogeno e fisiologico, a base di acido ialuronico in forma di sale, è destinato alla biostimolazione adiposa profonda.

**Attivazione adiposa profonda**

**Impalcatura biologica tridimensionale**

**Riorganizzazione della matrice dermica**

Area  
temporale

Cuscinetto  
adiposo

Angolo  
mandibolare

Area  
marionetta

**\_1**

**Acido ialuronico**

64 mg/2 g da 2 ml

**Composizione**

Acido ialuronico sale sodico 64 mg/2 g  
Tampone fosfato, cloruro di sodio, acqua  
per soluzioni iniettabili q.b. 2 g

**Packaging 1x2 ml**

2 aghi - 30 G x 13 mm  
Talloncini adesivi

**Piani anatomici**

Cuscinetto Adiposo  
Malare Profondo  
Area Marionetta

**\_2**

Angolo mandibolare  
Area Temporale

**Protocollo di mantenimento**

2<sup>a</sup> seduta: a 30 giorni dalla 1<sup>a</sup> seduta  
Mantenimento: Ripetere il trattamento  
ogni 4 mesi

**Parametri reologici**

G<sup>1</sup>: 80 Pa  
G<sup>2</sup>: 140 Pa  
δ: 1,75


# Invisible Excellence



## RHEOLYSE Restore 32



Idratazione dermica mirata, supporto metabolico tissutale, miglioramento progressivo di elasticità e qualità cutanea.

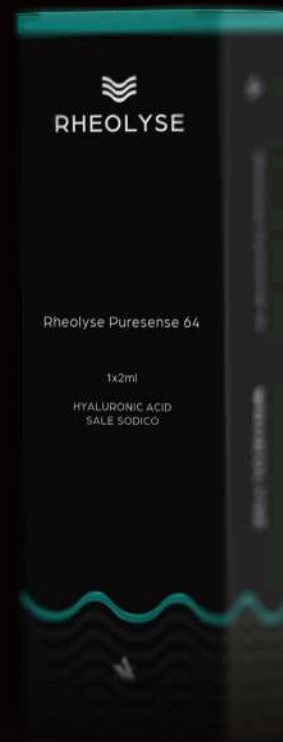

## RHEOLYSE Puresense 64




Ripristino profondo del supporto ipodermico, attivazione biologica, miglioramento progressivo di idratazione, elasticità e qualità cutanea.





# Restore 32

Prodotto da utilizzare con l'ago

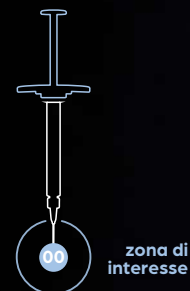

\_01

## AREA FRONTALE

Iniettare 0,05 ml per ogni ponfo

\_02

## AREA PERI OCULARE

Iniettare 0,05 ml per ogni ponfo

\_03

## AREA GUANCE

Iniettare 0,05 ml per ogni ponfo

\_04



## AREA PERIORALE

Iniettare 0,05 ml per ogni ponfo



# Puresense 64

Prodotto da utilizzare con l'ago

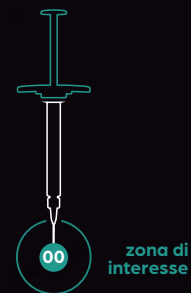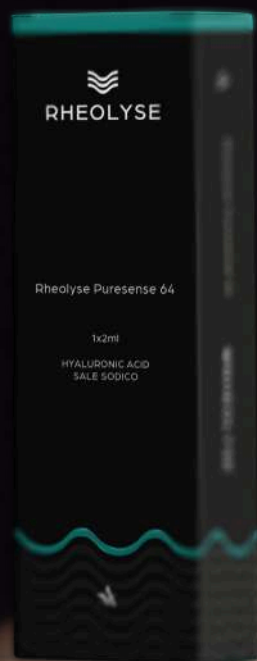

01

**\_01**  
**AREA TEMPORALE**

Iniettare 0,2 ml

02

**\_02**  
**AREA CUSCINETTO ADIPOSO**

Iniettare 0,4 ml

03

**\_03**  
**ANGOLO MANDIBOLARE**

Iniettare 0,2 ml

04

**\_04**  
**AREA MARIONETTA**

Iniettare 0,2 ml

## Certificazioni

Rheolyse opera secondo i più elevati standard internazionali di qualità, sicurezza e sostenibilità. Il sistema produttivo è certificato ISO 9001:2015 per la gestione della qualità, ISO 13485:2016 per i dispositivi medici e ISO 14001:2015 per la gestione ambientale, a garanzia di processi controllati, tracciabili e orientati alla sicurezza del medico e del paziente. I dispositivi sono conformi ai requisiti della Marcatura CE. Tutti i prodotti Rheolyse sono realizzati interamente in Italia, con controllo diretto di ogni fase produttiva. Un 100% Made in Italy che riflette competenza industriale, attenzione alla qualità delle materie prime e affidabilità clinica.



**14001:2015**

Sistema di gestione per la qualità e controllo dei processi.



**9001:2015**

Standard specifico per la produzione di dispositivi medici.



**13485:2016**

Gestione ambientale e controllo dell'impatto produttivo.



Conformità ai requisiti di sicurezza e prestazione europei.



 AESTHEMED

Via San Pietro 11 | 25030 Coccaglio (BS) ITALY  
info@aesthemed.it | Tel. +39 334 278 6495